


CONSIGLI UTILI PER UN'IMPRONTA OTTIMALE

- I nostri auricolari su misura necessitano un'impronta completa del padiglione. Un'impronta completa deve includere l'elice, il trago e l'antitrago.
- L'impronta può essere rilevata solo da un professionista dell'udito, quale ad esempio un audioprotesista.
- **IMPORTANTE: La lunghezza dell'impronta deve essere appena oltre la seconda curva del condotto.**
- L'impronta dovrebbe essere rilevata preferibilmente a bocca aperta. Ciò assicura una tenuta ottimale dell'auricolare nell'orecchio anche durante il movimento mandibolare. Se possibile utilizzare un bite di gomma durante la presa dell'impronta, per evitare movimenti mandibolari durante l'indurimento della pasta.

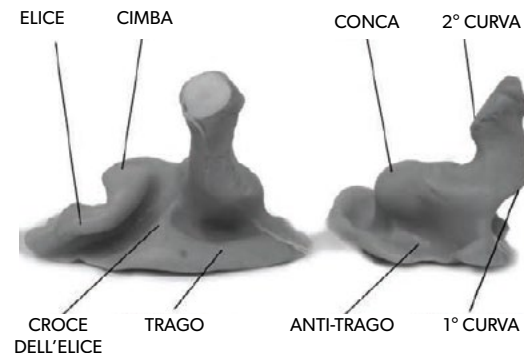

IMPORTANTE: l'impronta deve possedere tutti i punti chiave o potrebbe essere rifiutata. Per chiarimenti contattare 049 9545107.